



NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA


CODIGO FT-032

PAGINA

FICHA TÉCNICA

VERSION 0

FECHA 22-05-09

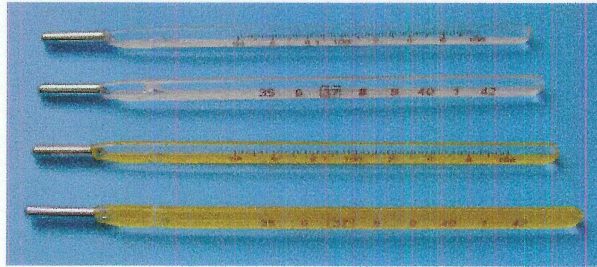

1. PRODUCTO

TERMÓMETRO CLÍNICO, VARIEDADES ORAL Y RECTAL.

2. MARCA

NIPRO

3. FABRICANTES Y ORIGEN

SHANGAI HUA CHEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD., CHINA

4. REFERENCIAS

- CR.W11, CR.W12, CR.W15, CR.W32, CR.W23
- CR.W11A, CR.W12A, CR.W15A, CR.W32A, CR.W223A

5. REGISTRO SANITARIO

Registro Sanitario: 2007DM-0001043

Vigencia: Octubre 30 de 2017

Clasificación de riesgo: I

6. PROPÓSITO

Medición de temperatura en las cavidades oral o rectal.

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo longitudinal en vidrio grado médico que tiene en su interior una columna de mercurio. El tubo de vidrio es transparente y liso. La forma del termómetro es prismática. Escala en grados Celsius.

Rango de temperatura entre 35 - 42° C.

Fondo coloreado para fácil lectura, alta precisión, alta estabilidad.

8. PARTES PRINCIPALES Y COMPONENTES

No.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Tubo	Vidrio
2	Capilar	Mercurio

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	ASPECTO	TERMOMETRO ORAL	TERMOMETRO RECTAL
1	Largo (mm)	110 ± 5	110 ± 5
2	Diámetro (mm)	3 ± 0,8	4,5 ± 1
3	Alto (mm)	52 ± 0,4	52 ± 0,4



NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA

CODIGO FT-032

PAGINA

FICHA TÉCNICA

VERSION 0

FECHA 22-05-09

10. FUNCIONAMIENTO

El volumen del mercurio aumenta con la temperatura de manera uniforme y se visualiza a través de la escala en grados Celsius del dispositivo.

11. INDICACIONES DE USO

1. Girar el termómetro para bajar la temperatura a menos de 35,5° C antes de usarlo.
2. Colocar el termómetro en la axila o en el ano por tres minutos.
3. Tomar la lectura.

12. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- a) Mantener protegido de temperatura y humedad extremas.
- b) Evitar sobreexposición a la luz solar.

13. MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

El producto no es suministrado estéril.

14. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El tiempo de vida útil del producto es dos años.

15. MÉTODO DE DESECHO

Descartar como residuo peligroso hospitalario contaminado con mercurio.

16. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- a) Mantener lejos del alcance de los niños.
- b) Producto frágil y delicado.

17. PRESENTACIONES COMERCIALES

Caja por 12 unidades

18. ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE

- ISO 9001:2000 Quality System Management
- ISO 13485:2003 Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for regulatory purposes