



INCENTIVADOR RESPIRATORIO

Una lanceta se utiliza para pinchar la piel contiene una pequeña aguja de punta fina 32G. El uso actual de la lanceta, en general descartable accionado por un resorte, usando para extraer sangre.

COMO UTILIZARLA

Las agujas del dispositivo de lanceta están cubiertas con una tapa que se gira. Carga las agujas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Lava tus manos con agua tibia y jabón. El agua tibia ayudará a aumentar el flujo sanguíneo. asegurate de secar tus manos por completo.

Masajea tu dedo con suavidad, frotando hacia la punta y aprieta lo tres veces. mantén el dispositivo de lanceta a un lado del dedo, ya que así es menos doloroso que en la parte media. Pulsa el gatillo y extrae una gota de sangre para la tira de ensayo.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Girar
- 2) Quitar La Tapa

